

◎Retinomax シリーズ 消毒について

COVID-19 の影響により各国において、エチルアルコール（消毒用アルコール）の比較的入手が困難になっております。
そこで、各国において比較的入手しやすい次亜塩素酸ナトリウムを 0.05% に希釈した溶液を Righton 製品の特定部品にて使用可能となります。

使用方法によっては、材料の劣化や色の変化が速くなる可能性がありますので注意が必要です。

上記消毒用アルコールもしくは次亜塩素酸ナトリウムを含んだガーゼ等を軽くしぼって使用してください。

○Retinomax 消毒について

Retinomax 本体・フリンター・ステーション外観カバー・額当て・ビューファインダー・接眼ゴム
消毒用アルコール使用可能・次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)使用可能

Retinomax フリンター透明カバー部分

消毒用アルコール使用不可(劣化・変色)。次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)使用可