

プラスチックの除菌

プラスチック製品には多くの種類があり、眼科で使用されるプリズムバーなどはアクリル製のものがあります。アクリル製品へのアルコールの使用はあまり推奨されていません（ヒビや白濁の発生の可能性）。

対策例として

- ・プリズムはアルコールが使えないので中性洗剤を用いて水道水で洗浄し、柔らかい布で水気を拭き取る

どうしても消毒したい場合

- ・次亜塩素酸ナトリウム（希釈液の濃度により浸け置きや拭き取り）
 - ・第4級アンモニウム塩（材質に関わらず劣化させないが消毒効果が弱い可能性）
- 長時間にわたって浸すことは避け、消毒後は水ですすいしてから水気を拭き取る

検眼枠は、除菌洗浄ペーパー（第4級アンモニウム塩配合）で清拭して乾燥